

## Critères d'acceptabilité des prélèvements primaires

Code Anawin	Catégorie	Nature de la NC	Secteur	Niveau	Traitement
NCD01	Demande d'examen	Renseignements cliniques insuffisants	ANA	Non bloquant	utiliser NNCD01 si aucun renseignement clinique
NCD01	Demande d'examen	Renseignements cliniques insuffisants	BM	Bloquant	Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin.
NCD01	Demande d'examen	Renseignements cliniques insuffisants	CG	Non bloquant	réaliser un maximum de cultures. Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin. Si les cultures sont inadéquates: résultats sous réserve.
NCD02	Demande d'examen	Date de prélèvement inconnue	ANA	Non bloquant	Utiliser lorsque date manquante
NCD02	Demande d'examen	Date de prélèvement inconnue	BM	Non bloquant	/
NCD02	Demande d'examen	Date de prélèvement inconnue	CG	Non bloquant	Signaler dans le CR en fonction de la qualité des résultats obtenus.
NCD02	Demande d'examen	Date de prélèvement inconnue	CL	Non bloquant	Utiliser lorsque date manquante
NCD03	Demande d'examen	Nature des analyses : manque de précision quant aux analyses demandées	ANA	Non bloquant	Ex:flacon milieu de Michel non renseigné, examen immuno pas coché.
NCD03	Demande d'examen	Nature des analyses : manque de précision quant aux analyses demandées	BM	Bloquant	NC si l'analyse ne peut être déduite des antécédents et des renseignements fournis sur la demande et si un contact avec le prescripteur est nécessaire.
NCD03	Demande d'examen	Nature des analyses : manque de précision quant aux analyses demandées	CG	Non bloquant	Choix en fonction des antécédents et des renseignements supervisés par Exp.Sc./médecin généticien et/ou contact téléphonique prescripteur.
NCD04	Demande d'examen	Incohérence entre analyse demandée par le prescripteur et le labo préleveur	BM	Non bloquant	/
NCD04	Demande d'examen	Incohérence entre analyse demandée par le prescripteur et le labo préleveur	CG	Non bloquant	réaliser un maximum de cultures. Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin. Si les cultures sont inadéquates résultats sous réserve.
NCD05	Demande d'examen	Un des prélèvements reçus par erreur	ANA	Bloquant	Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255. Retour du prélèvement reçu par erreur. Si rien pour IPG le code ne sert à rien, tout sera renvoyé, Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255.
NCD05	Demande d'examen	Un des prélèvements reçus par erreur	BM	Bloquant	Retour au labo demandeur ou élimination.
NCD05	Demande d'examen	Un des prélèvements reçus par erreur	CG	Bloquant	Téléphoner au prescripteur. Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255. Retour du prélèvement reçu par erreur.
NCD05	Demande d'examen	Un des prélèvements reçus par erreur	CL	Bloquant	Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255. Retour du prélèvement reçu par erreur.
NCD06	Demande d'examen	Analyse réalisée antérieurement	BM	Bloquant	Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée SAUF si une bonne raison existe pour recommencer l'analyse : évolution des techniques, doute quand au résultat, contrôle présymptomatique,...
NCD06	Demande d'examen	Analyse réalisée antérieurement	CG	Bloquant	<b>Constit:</b> si analyse réalisée il y a moins de 5 ans et si résolution de 500bandes obtenue à Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut être réalisée ajout code "099"

<b>NCD07</b>	Demande d'examen	Prélèvements sans demande	<b>ANA</b>	Bloquant	Contact téléphonique avec prescripteur, labo, Clinique, selon le résultat du contact, retour avec IPG-FE-255 ou mise en attente jusqu'à réception de la demande correspondante
<b>NCD07</b>	Demande d'examen	Prélèvements sans demande	<b>BM</b>	Bloquant	Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin.
<b>NCD07</b>	Demande d'examen	Prélèvements sans demande	<b>CG</b>	Non Bloquant	Contact téléphonique avec prescripteur, mise en culture en fonction de la nature du prélèvement.
<b>NCD07</b>	Demande d'examen	Prélèvements sans demande	<b>CL</b>	Bloquant	Contact téléphonique avec prescripteur, labo, Clinique, selon le résultat du contact, retour avec IPG-FE-255 ou mise en attente jusqu'à réception de la demande correspondante
<b>NCD07</b>	Demande d'examen	Prélèvements sans demande	<b>CL</b>	Non bloquant	si origine connue, rédaction de la demande et contact prescripteur
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement (pas de flacon,tube, lame)	<b>ANA</b>	Bloquant	Contact téléphonique prescripteur/labo et/ou retour au demandeur selon résultat du contact téléphonique.Tracer dans la farde avec IPG-FE-255. Le code NNCD08 sera inscrit sur sur la nouvelle demande de manière à figurer dans le CR
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement (pas de flacon,tube, lame)	<b>BM</b>	Bloquant	Contact téléphonique prescripteur/labo.
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement (pas de flacon,tube, lame)	<b>CG</b>	Bloquant	Contact téléphonique prescripteur/labo.
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement : pas de flacon,tube, lame (Plaque sans lame )	<b>CL</b>	Bloquant	envoi courrier prescripteur
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement : pas de flacon,tube, lame (Pas de lame)	<b>CL</b>	Bloquant	envoi courrier prescripteur
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement : pas de flacon,tube, lame (Pas de flacon TP)	<b>CL</b>	Bloquant	envoi courrier prescripteur
<b>NCD08</b>	Demande d'examen	Demande sans prélèvement : pas de flacon,tube, lame (Pas de lame/de flacon)	<b>CL</b>	Bloquant	envoi courrier prescripteur
<b>NCD09</b>	Demande d'examen	Nature prélèvement inconnue	<b>ANA</b>	Non bloquant	appliquer le code NNCD09. Utiliser le code examen inconnu uniquement si nature pas identifiable
<b>NCD09</b>	Demande d'examen	Nature prélèvement inconnue	<b>BM</b>	Non bloquant	contact téléphonique prescripteur/labo si nécessaire, indiquer nature prélèvement anonyme dans CR le cas échéant
<b>NCD09</b>	Demande d'examen	Nature prélèvement inconnue	<b>CG</b>	Non bloquant	Si on ne sait pas déterminer la nature du prélèvement, contact téléphonique avec le prescripteur. Cela sera signaler dans le compte rendu.
<b>NCD09</b>	Demande d'examen	Nature prélèvement inconnue	<b>CL</b>	Non bloquant	Utiliser le code examen inconnu et le code NNCD09 uniquement si on ne peut pas déduire la nature du prélèvement.
<b>NCD10</b>	Demande d'examen	Demande accompagnant une série de flacons, dont au moins 1 est vide	<b>ANA</b>	Bloquant	Si flacon(s) vide(s) avec série de flacons, le pathologiste traitera l'info dans le CR ( <b>code NNCD10</b> ) <b>ENR</b> : pas de médecin en copie - pas de facturation - encoder code Tech NCFV. <b>SA</b> : rédaction d'un courrier envoyé au prescripteur avec copie de la demande d'examen (NCFV)
<b>NCD11</b>	Demande d'examen	Discordance entre le prélèvement reçu et l'analyse demandée	<b>ANA</b>	Bloquant	l'analyse correspondant au type de prélèvement reçu est effectuée
<b>NCD20</b>	Demande d'examen	Heure de début de fixation inconnue	<b>ANA</b>	Non bloquant	/
<b>NCD20</b>	Demande d'examen	Heure de début de fixation inconnue	<b>CG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR (Code NNCD20 apparaît dans Diamic et CR GH.)

<b>NCD21</b>	Demande d'examen	Lame immuno absente ou cassée (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR
<b>NCD22</b>	Demande d'examen	Durée de fixation non communiquée (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR
<b>NCD23</b>	Demande d'examen	Copie CR Histologie absente ou Renseignements histo incomplets (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Bloquant	Contact téléphonique ou fax secrétariat Anapath / demande de copie par FAX ou courrier. Si pas de retour, la NC est inscrite dans le CR
<b>NCD24</b>	Demande d'examen	Renseignements cliniques illisibles	<b>ANA</b>	Non bloquant	Utiliser seulement après avoir demandé au RS et/ou à un Pathologiste
<b>NCD25</b>	Demande d'examen	Pourcentage de Plasmocytes non transmis	<b>CG</b>	Non bloquant	Indiquer la NC dans le CR.
<b>NCI01</b>	Identification du prélèvement	Prélèvement anonyme	<b>ANA</b>	Bloquant	Communication téléphonique selon l'arrêté royal du 05.12.11 ou renvoi du prélèvement tracé avec IPG-FE-255, selon cas de figure. Le code est enregistré de manière à apparaître dans le CR
<b>NCI01</b>	Identification du prélèvement	Prélèvement anonyme	<b>BM</b>	Non bloquant	Demande de confirmation par le médecin et signaler dans le CR
<b>NCI01</b>	Identification du prélèvement	Prélèvement anonyme	<b>CG</b>	Non bloquant	Signaler dans le CR
<b>NCI01</b>	Identification du prélèvement	Prélèvement anonyme	<b>CL</b>	Non bloquant	Signaler dans le CR sans demande de confirmation
<b>NCI02</b>	Identification du prélèvement	Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement	<b>ANA</b>	Bloquant	Tracer dans la farde des retours avec IPG-FE-255 et retour au demandeur
<b>NCI02</b>	Identification du prélèvement	Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement	<b>BM</b>	Bloquant	On jette et on demande un nouveau prélèvement sauf si précieux, contact avec le prescripteur et signaler dans le CR.
<b>NCI02</b>	Identification du prélèvement	Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement	<b>CG</b>	Non bloquant	Demande de confirmation par le médecin (contact téléphonique) et signaler dans le CR.
<b>NCI02</b>	Identification du prélèvement	Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement	<b>CL</b>	Bloquant	Tracer dans la farde des retours avec IPG-FE-255 et retour au demandeur
<b>NCI03</b>	Identification du prélèvement	Prélèvement anonyme dissocié de la demande	<b>ANA</b>	Bloquant	Renvoi du prélèvement tracé avec IPG-FE-255. Le code est enregistré lors de la réception du prélèvement identifié de manière à apparaître dans le CR
<b>NCA01</b>	Adéquation du prélèvement	Mauvais milieu de transport	<b>ANA</b>	Non bloquant	Fixer et renseigner le type de milieu sur la demande d'examen pour pathologistes et CG
<b>NCA01</b>	Adéquation du prélèvement	Mauvais milieu de transport	<b>CL</b>	Non bloquant	joindre le document type au CR (KNCA01)
<b>NCA02</b>	Adéquation du prélèvement	Quantité de matériel insuffisante	<b>BM</b>	Non bloquant	Essai et si échec technique, redemander un prélèvement
<b>NCA02</b>	Adéquation du prélèvement	Quantité de matériel insuffisante	<b>BM</b>	Bloquant	redemander un prélèvement directement si nécessité (délais de réponse, santé du patient,...)
<b>NCA02</b>	Adéquation du prélèvement	Quantité de matériel insuffisante	<b>CG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCA03</b>	Adéquation du prélèvement	Type de prélèvement non-conforme	<b>BM</b>	Bloquant	demande d'un nouveau prélèvement
<b>NCA04</b>	Adéquation du prélèvement	Conditions de transport non conformes	<b>ANA</b>	Non bloquant	Réalisation des analyses
<b>NCA04</b>	Adéquation du prélèvement	Conditions de transport non conformes	<b>ANA</b>	Bloquant	Envoi courrier via codes bible
<b>NCA04</b>	Adéquation du prélèvement	Conditions de transport non conformes (Frottis sur plaquette )	<b>CL</b>	Bloquant	Envoi courrier via codes bible
<b>NCA04</b>	Adéquation du prélèvement	Conditions de transport non conformes (Lames cassées)	<b>CL</b>	Bloquant	Envoi courrier via codes bible
<b>NCA04</b>	Adéquation du prélèvement	Conditions de transport non conformes (Flacon cassé)	<b>CL</b>	Bloquant	Envoi courrier via codes bible
<b>NCA04</b>	Adéquation du prélèvement	Conditions de transport non conformes (Flacon mal fermé)	<b>CL</b>	Bloquant	Envoi courrier via codes bible
<b>NCA05</b>	Adéquation du prélèvement	Milieu de transport périmé	<b>ANA</b>	Non bloquant	Réalisation des analyses
<b>NCA20</b>	Adéquation du prélèvement	Prélèvement fixé	<b>CG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée

<b>NCA21</b>	Adéquation du prélèvement	Prélèvement macéré	<b>CG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCA22</b>	Adéquation du prélèvement	Quantité de matériel faible	<b>CG</b>	Non bloquant	essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu.
<b>NCA22</b>	Adéquation du prélèvement	Quantité de matériel faible	<b>CL</b>	Non bloquant	Réalisation de l'analyse
<b>NCA23</b>	Adéquation du prélèvement	Température de conservation du prélèvement	<b>CG</b>	Non bloquant	essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu.
<b>NCA24</b>	Adéquation du prélèvement	Héparine de lithium / EDTA non-reçu	<b>CG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier(ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCA25</b>	Adéquation du prélèvement	Prélèvement coagulé	<b>CG</b>	Non bloquant	essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu.
<b>NCA26</b>	Adéquation du prélèvement	Passé par la boîte aux lettres	<b>CG</b>	Non bloquant	essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu.
<b>NCA27</b>	Adéquation du prélèvement	Onco après 24h:ganglion, tumeur, moelle/sang (LLA, myélome). Moelle/sang d'autres pathologies après 3 jours de délai. Prénatal après 48 h de délai et postnatal après 5 jours de délai.	<b>CG</b>	Non bloquant	essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu.
<b>NCA28</b>	Adéquation du prélèvement	Bloc paraffine défectueux (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Bloquant	Contact labo / demande de bloc conforme / renvoi autre bloc ou réenrober à l'IPG
<b>NCA29</b>	Adéquation du prélèvement	Absence de tumeur sur le bloc (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Bloquant	Contact labo / demande de bloc avec tumeur / renvoi autre bloc
<b>NCA30</b>	Adéquation du prélèvement	Fixateur autre que formol neutre 10% (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCA31</b>	Adéquation du prélèvement	Ancien prélèvement fixé au bouin (bloc extérieur)	<b>CG</b>	Non bloquant	essai technique mais résultat sous réserve
<b>NCA32</b>	Adéquation du prélèvement	Temps de fixation < 6 heures	<b>ANA</b>	Non bloquant	sera utilisé uniquement si un Pathologiste décide de mettre le prélèvement en URGENCE
<b>NCA32</b>	Adéquation du prélèvement	Temps de fixation < 6 heures	<b>CG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR (Code NNCD32 apparaît dans Diamic et CR GH.)
<b>NCA33</b>	Adéquation du prélèvement	Temps de fixation > 72 heures	<b>ANA</b>	Non bloquant	/
<b>NCA33</b>	Adéquation du prélèvement	Temps de fixation > 72 heures	<b>CG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR (Code NNCD33 apparaît dans Diamic et CR GH.)
<b>NCA40</b>	Adéquation du prélèvement	Anticoagulant non-conforme	<b>BM</b>	Bloquant	demande d'un nouveau prélèvement SAUF si prélèvement précieux, essai et signaler dans le CR
<b>NCA41</b>	Adéquation du prélèvement	Anticoagulant indéterminé	<b>CG</b>	Non bloquant	Réalisation de l'analyse et contact labo ou médecin
<b>NCA50</b>	Adéquation du prélèvement	Présence de brosse dans monocouche	<b>CL</b>	Non bloquant	Réalisation de l'analyse
<b>NCA51</b>	Adéquation du prélèvement	Prélèvement non fixé	<b>ANA</b>	Non bloquant	fixer et renseigner sur la demande pour le Pathologiste
<b>NCA52</b>	Adéquation du prélèvement	Tube/flacon cassé	<b>CG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier(ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCA53</b>	Adéquation du prélèvement	Placenta macéré	<b>ANA</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier(ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCA54</b>	Adéquation du prélèvement	Prélèvement hémolysé	<b>CG</b>	Non bloquant	essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu.
<b>NCA54</b>	Adéquation du prélèvement	Prélèvement hémolysé	<b>BM</b>	Bloquant	Prevenir un RS et envoi d'un courrier (ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCM01</b>	Administratif	Absence renseignement administratif du patient	<b>ANA</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM01</b>	Administratif	Absence renseignement administratif du patient	<b>BM</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM01</b>	Administratif	Absence renseignement administratif du patient	<b>CG</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM01</b>	Administratif	Absence renseignement administratif du patient	<b>CL</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM02</b>	Administratif	Identification du médecin prescripteur illisible	<b>ANA</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM02</b>	Administratif	Identification du médecin prescripteur illisible	<b>BM</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin

<b>NCM02</b>	Administratif	Identification du médecin prescripteur illisible	<b>CG</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM02</b>	Administratif	Identification du médecin prescripteur illisible	<b>CL</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCM03</b>	Administratif	Identification du patient sur la demande du prescripteur différente de celle du laboratoire préleveur>>>>erreur de vignette par le labo	<b>BM</b>	Bloquant	Demander confirmation par FAX au labo.
<b>NCM03</b>	Administratif	Identification du patient sur la demande du prescripteur différente de celle du laboratoire préleveur>>>>erreur de vignette par le labo	<b>CG</b>	Non bloquant	Contact labo ou médecin
<b>NCLI</b>	Adéquation du prélèvement	demande de lithiase	<b>ANA</b>	Bloquant	Code bible contenant une lettre destinée au prescripteur lui précisant que nous n'analysons pas les lithiases. Déposer la lettre dans le monte charge pour juana
<b>NCTR</b>	Adéquation du prélèvement	Pas d'analyse réalisée à l'IPG- transfert de prélèvement	<b>ANA</b>	Bloquant	Code bible contenant une lettre pour transférer les prélèvements car aucune analyse ne sra réalisée à l'IPG. Déposer la lettre dans le monte charge pour juana
<b>NCFV</b>	Adéquation du prélèvement	Demande avec flacon(s) vide(s) de prélèvement uniquement	<b>ANA</b>	Bloquant	Tracer la communication téléphonique avec le médecin prescripteur sur l'IPG-FE-555 et traiter le prélèvement comme décrit dans l'IPG-IN-112 <b>ENR</b> : pas de médecin en copie-pas de facturation-encoder code tech NCFV <b>SA</b> :rédaction d'un courrier envoyé au prescripteur avec copie de la demande d'examen
<b>NCT01</b>	3. Transport	Prélèvement accidenté lors du transport	<b>IPG</b>	Bloquant	Envoi d'un courrier (ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée
<b>NCT02</b>	3. Transport	Température de transport non conforme - T° trop basse	<b>IPG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR.
<b>NCT03</b>	3. Transport	Température de transport non conforme - T° trop élevée	<b>IPG</b>	Non bloquant	Résultat sous réserve. Texte dans CR.